

Hygienguide

HEKA

Designad för hygien

Heka S⁺ är designad för att vara så hygienisk och enkel att rengöra som möjligt. Den inkluderar genomtänkta detaljer, bland annat har man använt härdat glas. Dess släta hårda yta är extra enkelt att rengöra och desinficera. Den inbyggda pekdisplayen säkerställer att det inte finns några knappar/reglage som kan samla damm och smuts.

Allmän rengöring av ytor

Alla ytor på enheten är antingen av pulverbelagt aluminium eller härdat glas. Displayen kan givetvis låsas under rengöring och låses automatiskt upp igen efter två minuter så att enheten är redo igen före nästa patient.

Alla kontaktpunkter - handtag och instrumentbricka - kan enkelt tas bort för rengöring och autoklavering.

Detta inkluderar även handtagen till OP-lampan.



Automatisk instrumentskölj

Effektiv sköljning av enhetens vattensystem och instrumentslangarna är en viktig faktor för att hålla enheten fri från biofilm. Automatisk instrumentsköljning gör det enkelt att spola igenom instrumentslangarna -

både dagligen och mellan patienter - snabbt och effektivt.

Det är enkelt att aktivera spottkoppssköljning efter instrumentsköljning för att även spola igenom denna del av vattensystemet.



Rengöring av sugsystemet

Vid automatiskt sug aktiveras ett munstycke i änden av sugslangarna som kontinuerligt rengör sugsystemet med kemikalier eller bara rent vatten. Detta bidrar till att hålla hela sugsystemet rent och effektivt.

Det är möjligt att aktivera sköljning med kemikalier eller enbart vatten under pågående patientbehandling.

Detta säkerställer effektiv borttagning av alla orenheter utan att slangen torkar ut för att förhindra att orenheterna antar fast form och ansamlas inuti slangen.

Regelbunden sköljning med aktiva kemikalier mellan patienter eller på kvällen kan säkerställa en minskning av kolonibildande enheter, mikrober och bakterier i sugsystemet.



Spottkoppsskål/ Spottkoppsventil/eventuell amalgamseparator

Säkerställer effektivt vattenflöde från spottkoppssystemet. En amalgamseparator

avlägsnar även amalgam från spottkoppstvatten.

Spottkoppsskålen kan enkelt tas bort för rengöring.



Aktiv vattenrening

Vid val av aktiv vattenrening doseras aktiv rengöringsvätska kontinuerligt i

enhetens vattensystem i syfte att hålla antalet bakterier nere och undvika bildning av biofilm.

Vattenrenningssystemet finns i två varianter, med eller utan DVGW-godkänd vattenspalt.



Rutiner för rengöring av enheterna


Morgon

- Skölj instrumenten med automatisk instrumentskölj - långa programmet
- Skölj sugsystemet med den automatiska sugrengöringen (eller genom att suga in rengöringsvätska).



Före varje patient

- Rengöring och desinficering av ytor och instrumentslangar, inklusive handtag och stolklädsel
- Kort sköljning av instrument med automatisk instrumentskölj
- Sköljning av sugsystem med aktiva kemikalier för invändig desinficering - sughandenheter rengörs och torkas av med ett godkänt desinfektionsmedel.

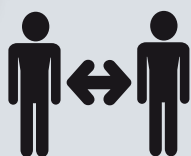


Kväll

- Skölj sugsystemet med aktiva kemikalier. Sughandenheter tas bort och rengörs i enlighet med klinikkens rutiner
- Kontrollera och rengör filtren i sugslangarna
- Ta bort handtagen och instrumentbricksen - rengör och autoklaver i enlighet med mottagningens rutiner.



Övrigt (Efter behov)

- Kontrollera och applicera igen, vid behov, kemikalier i sugrengöringen och/eller aktiv vattenrening
- Kontrollera spottkoppsventilen/avloppsfiltret och rengör vid behov
- Byt ut amalgambehållaren om den är full.

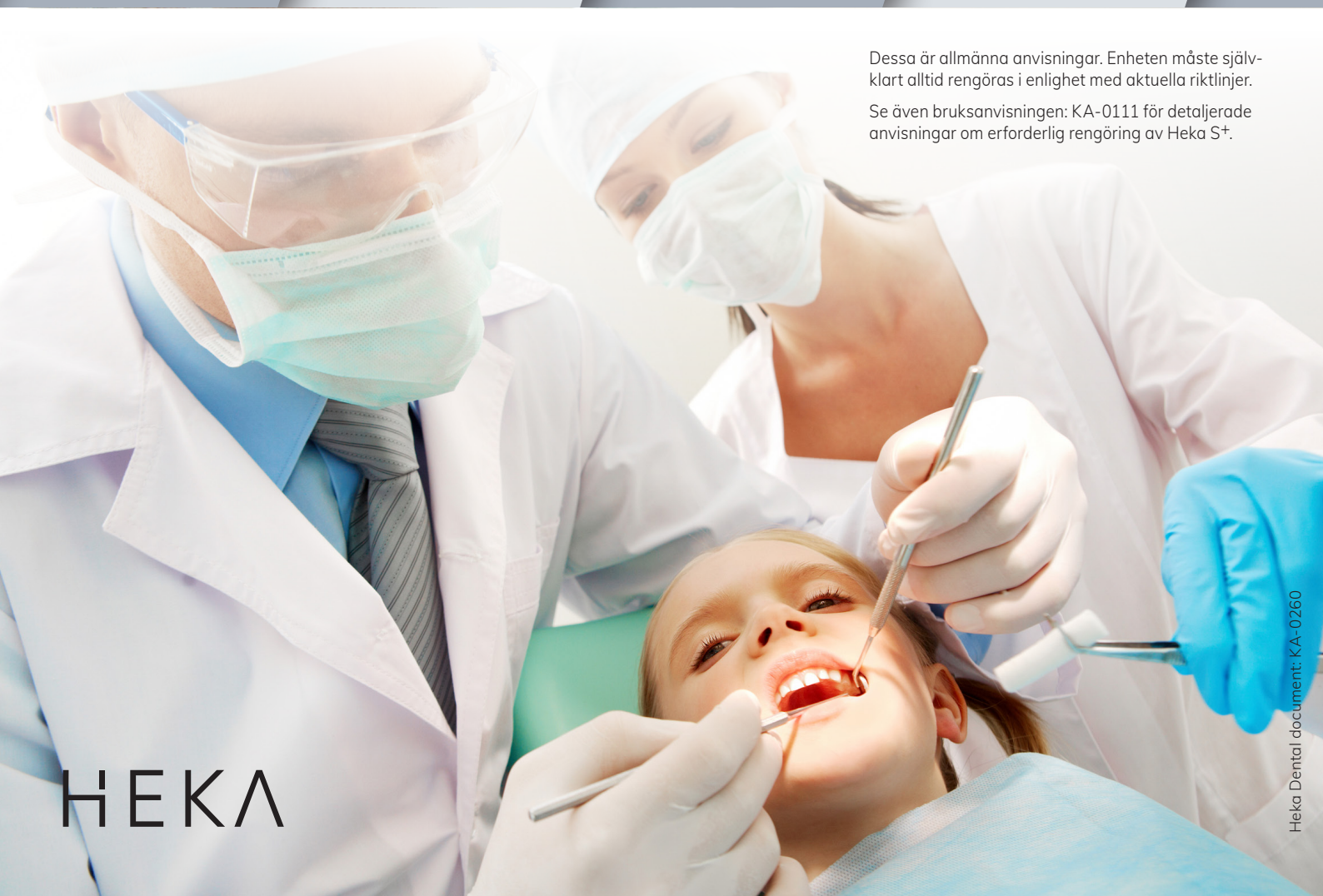

Dessa är allmänna anvisningar. Enheten måste självklart alltid rengöras i enlighet med aktuella riktlinjer.

Se även bruksanvisningen: KA-0111 för detaljerade anvisningar om erforderlig rengöring av Heka S+.

HEKA