

Antes de irte de vacaciones...

Si vas a tomarte varias semanas de vacaciones y vas a dejar una unidad dental sin usar, es importante tomar varias precauciones para lograr una higiene óptima y prolongar su vida útil. A continuación encontrarás una guía completa sobre cómo cuidar y preparar una unidad dental para las vacaciones (puede variar en función de la marca/fabricante):

1

Superficies y zonas de trabajo

Limpia todas las superficies visibles con productos de limpieza y desinfección adecuados.

Incide especialmente en los paneles de control, los asideros, las fuentes de luz y las fundas de los sillones de los pacientes.

2

Sistemas de aspiración y recogida de saliva

Limpia y desinfecta a fondo el sistema de aspiración con el limpiador de aspiración recomendado (normalmente limpieza enzimática seguida de desinfección).

Aclara con abundante agua limpia si lo recomienda el fabricante.

3

Mangueras y piezas de mano para instrumentos

Retira y limpia todas las piezas de mano y turbinas. Lubrica y esteriliza según las instrucciones.

Sopla aire a través de las mangueras y limpia con toallitas desinfectantes los conectores si es necesario.

4

Sistema de agua y prevención de biopelículas

Si tu unidad dental está conectada a un sistema de agua independiente (sistema de botella):

Vacía y limpia la botella.

Lava las mangueras con un desinfectante aprobado para unidades dentales.

Si la unidad está conectada al suministro de agua de la clínica: Realiza la rutina de desinfección recomendada (desinfección continua o de choque según el tipo de sistema). A continuación, cierra el suministro de agua a la unidad.

NOTA: En el agua estancada pueden formarse biopelículas; una desinfección adecuada reduce el riesgo.

5

A la vuelta de vacaciones

Realiza un lavado a fondo del sistema de agua.

Realiza la rutina de desinfección recomendada (desinfección continua o de choque según el tipo de sistema) o, en el caso de los sistemas de agua embotellada, limpia la botella de agua y enjuégala con un desinfectante aprobado.

Realiza la rutina diaria de puesta en marcha, incluida la comprobación de las piezas de mano y el sistema de aspiración.

Comprueba si hay fugas o irregularidades.

6

Condiciones técnicas

Apaga la unidad mediante el interruptor principal.

Desconecta el compresor y el sistema de vacío si es posible.

Si es posible, desconecta el aire comprimido y el agua del suministro.

7

Más consejos

Sigue siempre las instrucciones de mantenimiento del fabricante, por ejemplo, de Heka Dental si trabajas con unidades HEKA.

Si tienes un contrato de mantenimiento, puede ser una buena idea mandar a revisar la unidad durante tus vacaciones.

Puedes descargar nuestra guía de higiene para tu unidad HEKA aquí:

[Guía de higiene de Heka S+](#)

[Guía de higiene de UnicLine S](#)

HEKA

